

# PLEXTALK®

## Kurzanleitung – Plectalk PTN2

In dieser Kurzanleitung werden die Hauptfunktionen des Players beschrieben. Die Nummern auf den Diagrammen sind im Text angegeben.

### 1. Plectalk PTN2 an das Stromnetz anschließen

Den kleinen runden Stecker am Netzkabel hinten am Gerät anschließen (1). Das mitgelieferte Stromkabel muss vor dem Einstecken in die Steckdose fest mit dem Netzteil verbunden sein.

### 2. Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten (2). Zum Ausschalten die Ein-/Aus-Taste erneut gedrückt halten (2).

### 3. Abspielmedium einlegen

CD: In den CD-Schlitz (3) vorne am Gerät schieben, bis sie automatisch eingezogen wird.

SD-Karte: In den SD-Kartenschlitz (4) auf der linken Seite stecken.

USB-Gerät: In den USB-Schlitz (5) auf der linken Seite stecken.

### 4. Abspielmedium entfernen

CD: Auswurf-taste drücken (6), und die CD wird automatisch ausgeworfen.


SD-Karte: Karte nach innen schieben, und sie springt heraus.

USB-Gerät: Vom Player abziehen.


### 5. Wiedergabe und Stopp

Zum Starten der Wiedergabe die Play-/Stoptaste drücken (7).


Zum Beenden der Wiedergabe die Play-/Stoptaste erneut drücken (7).

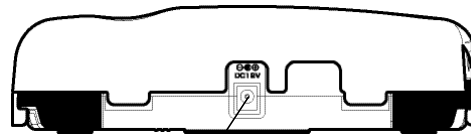


(1) Netzkabelanschluss

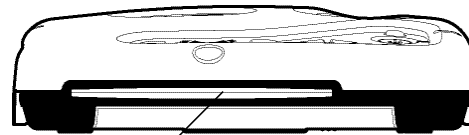

(3) CD-Schlitz

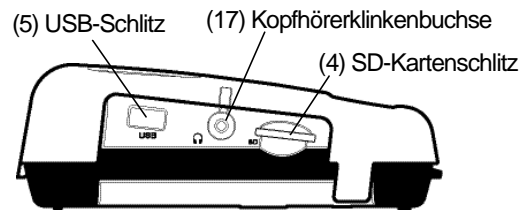

(5) USB-Schlitz (17) Kopfhörerklippenbuchse (4) SD-Kartenschlitz

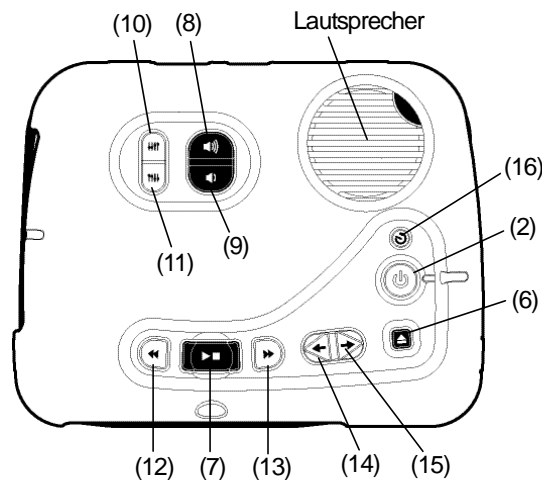

### 6. Lautstärke und Klang einstellen

Lautstärke: Zum Erhöhen die Lauter-Taste (8), zum Senken die Leiser-Taste drücken (9).

Klang: Zum Erhöhen die Höher-Taste (10), zum Senken die Tiefer-Taste drücken (11).

### 7. Vor-/Zurückspulen

Zum Zurückspulen die Rückspultaste gedrückt halten (12). Zum Vorspulen die Vorspultaste gedrückt halten (13).

### 8. Medium und Titel auswählen

Vorheriger-Titel-Taste (14) und Nächster-Titel-Taste (15) so lange gleichzeitig drücken, bis das gewünschte Medium erreicht ist. Dann die Vorheriger-Titel-Taste (14) oder Nächster-Titel-Taste (15) zur Titelauswahl drücken.

### 9. Einschlaffunktion einstellen

Einschlaf-taste (16) immer wieder drücken bis die gewünschte Zeit erreicht ist.

### 10. Kopfhörer

Klinkenstecker des Kopfhörers an die Klinkenbuchse (17) des Geräts anschliessen.



SHINANO KENSHI CO.,LTD.  
<http://www.plectalk.com/>

2009 Feb.

127-3969901

# PLEXTALK®

## Kurzanleitung – Plectalk PTN2

In dieser Kurzanleitung werden die Hauptfunktionen des Players beschrieben. Die Nummern auf den Diagrammen sind im Text angegeben.

### 1. Plectalk PTN2 an das Stromnetz anschließen

Den kleinen runden Stecker am Netzkabel hinten am Gerät anschließen (1). Das mitgelieferte Stromkabel muss vor dem Einstecken in die Steckdose fest mit dem Netzteil verbunden sein.

### 2. Ein-/Ausschalten, Einschlaffunktion einstellen

Ein-/Aus-Taste gedrückt halten (2).

Einschlaf-taste (3) bis zum Erreichen der gewünschten Einstellung drücken.

### 3. Abspielmedium einlegen

CD: In den CD-Schlitz (4) vorne am Gerät schieben, bis sie automatisch eingezogen wird.

SD-Karte: In den SD-Kartenschlitz (5) auf der linken Seite stecken.

USB-Gerät: In den USB-Schlitz (6) auf der linken Seite stecken.

### 4. Abspielmedium entfernen

CD: Auswurf-taste drücken (7), und die CD wird automatisch ausgeworfen.

SD-Karte: Karte nach innen schieben, und sie springt heraus.

USB-Gerät: Vom Player abziehen.

### 5. Wiedergabe und Stopp

Zum Starten der Wiedergabe die Play-/Stoptaste drücken (8).


Zum Beenden der Wiedergabe die Play-/Stoptaste erneut drücken (8).

### 6. Lautstärke, Geschwindigkeit und Klang einstellen




Lautstärke: Zum Erhöhen die Lauter-Taste (9), zum Senken die Leiser-Taste drücken (10).

Geschwindigkeit: Zum Erhöhen die Schneller-Taste (11), zum Senken die Langsamer-Taste drücken (12).

Klang: Zum Erhöhen die Höher-Taste (13), zum Senken die Tiefer-Taste drücken (14).

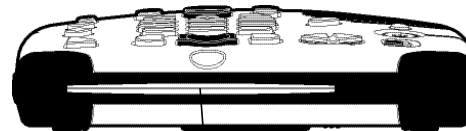

(4) CD-Schlitz

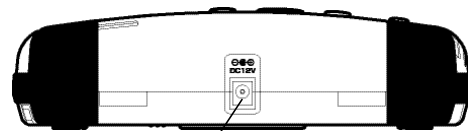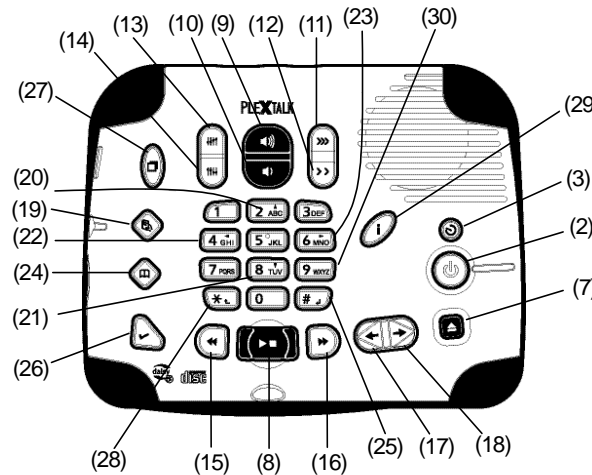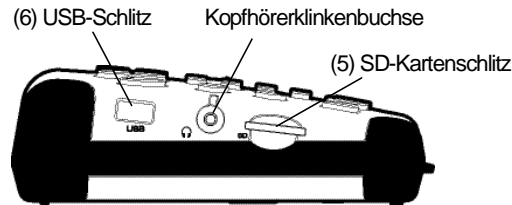

(1) Netzkabelanschluss

### 7. Vor-/Zurückspulen

Zum Zurückspulen die Rückspultaste gedrückt halten (15).

Zum Vorspulen die Vorspultaste gedrückt halten (16).

### 8. Medium und Titel auswählen

Vorheriger-Titel-Taste (17) und Nächster-Titel-Taste (18) so lange gleichzeitig drücken, bis das gewünschte Medium erreicht ist. Einmal die Bücherregal-Taste (19) drücken um den Titel zu wechseln. Dann die Vorheriger-Titel-Taste (17) oder Nächster-Titel-Taste (18) zur Titelauswahl drücken.

### 9. Ebenen (Lesezeichen) anspringen

Taste 2 (20) oder Taste 8 (21) zur Auswahl der Navigationsebene drücken (Lesezeichen), und mit Taste 4 (22) oder Taste 6 (23) durch die gewählte Ebene (Lesezeichen) navigieren.

### 10. Seite/Überschrift anspringen

Seite: Gehe-zu-Taste einmal drücken (24) und Seitenzahl auf dem Nummernblock eingeben, dann Eingabe drücken (25), um die Seite anzuspringen.

Überschrift: Gehe-zu-Taste zweimal drücken (24) und Überschriftennummer auf dem Nummernblock eingeben, dann Eingabe drücken (25), um die Überschrift anzuspringen.

### 11. Lesezeichen anspringen/hinzufügen

Lesezeichentaste einmal drücken (26) und die Nummer des Lesezeichens auf der Tastatur eingeben, dann Eingabe drücken (25), um das Lesezeichen anzuspringen.

Auf der gewünschten Position die Lesezeichentaste zweimal drücken (26) und die Nummer des Lesezeichens auf der Tastatur eingeben, dann Eingabe drücken (25), um das Lesezeichen hinzuzufügen.

### 12. Menüauswahl

Menütaste drücken (27), und Taste 4 (22) oder Taste 6 drücken (23), um ein Menü auszuwählen, dann mit Eingabe bestätigen (25), oder mit Abbrechen abbrechen (28).

### 13. Buchinformationen abrufen

Informationstaste drücken (29), um Informationen zum Buch abzurufen.

### 14. Titel von einem auf ein anderes Medium kopieren

Zunächst den zu Kopierenden Titel auswählen. Zur Auswahl der Kopierfunktion die Taste 9 drücken (30), und mit Taste 4 (22) oder Taste 6 (23) ein Zielmedium auswählen, dann mit Eingabe bestätigen (25). Der Plectalk fragt, ob Sie fortfahren möchten. Zum Fortfahren erneut Eingabe drücken (25) oder Abbrechen (28) zum Abbrechen.